

Chirurgische Maske CE (x 50)



Normen

EN14683

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Chirurgische Maske mit Spritzschutz.

Technische Details

Drei gefaltete, nicht gewebte Vlieslagen.

Antihaftbeschichtung.

Nasenspange.

Zwei Gummibänder zum Halten hinter den Ohren.

Bakterielle Filterwirkung > 95 %.

Hinweis

Die Maske ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Die Maske muss regelmäßig gewechselt werden.

Anwendung(en)

Soll die Verschleppung von Infektionserregern durch Tröpfchen oder durch die Luft beim Ausatmen verhindern.

Verwendungsart

1. Ziehen Sie die Maske heraus und setzen Sie sie auf, indem Sie sie nur an den Gummibändern festhalten.
2. Achten Sie beim Anziehen der Maske darauf, dass der Nasenbügel oben in Höhe der Nase liegt.
3. Befestigen Sie die Gummibänder hinter den Ohren.
4. Die Maske muss gut entfaltet sein. Bedecken Sie Nase, Mund und Kinn.
5. Wenn Sie die Maske aufgesetzt haben, dürfen Sie sie nicht mehr berühren oder zurechtrücken, bis sie wieder abgenommen wird.
6. Nach dem Abnehmen Maske entsorgen und Hände waschen.

WEITERE INFORMATIONEN

Lagertemperatur: -20 °C und 40 °C.

Maximale Lagerfeuchtigkeit: 80 %.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 9
Länge (cm) : 19,5
Tiefe (cm) : 10

Nettogewicht (kg) : 0,18
Bruttogewicht (kg) : 0,22



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 39
Länge (cm) : 61,5
Tiefe (cm) : 42

Nettogewicht (kg) : 12,2
Bruttogewicht (kg) : 13,2

x 60.00



Überverpackung 2



Palette

Höhe (cm) : 120
Länge (cm) : 80
Tiefe (cm) : 120

Nettogewicht (kg) : 160
Bruttogewicht (kg) : 177



x 720.00