

Chirurgische Maskers CE (x 50)



Normen

✓ EN14683

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Chirurgisch anti-projectiemasker.

Technische details

Driemaal gevouwen, niet-geweven.

Plakt niet.

Neusstrip.

Twee elastieken voor ondersteuning achter de oren.

Bacteriële filtratie efficiëntie > 95%.

Richtlijnen

Het masker is voor eenmalig gebruik.

Het masker moet regelmatig vervangen worden.

Toepassingen

Bedoeld om de projectie van infectieuze agentia door druppels of door de lucht te vermijden bij het uitademen.

Gebruiksmethode

1. Trek het masker uit en breng het aan door het alleen bij de elastieken vast te houden.
2. Respecteer de toepassingsrichting met de strip aan de bovenkant van de neus.
3. Plaats de elastieken achter de oren.
4. Het masker moet goed uitgevouwen zijn. Bedek neus, mond en kin.
5. Eenmaal geplaatst, niet aanraken of herpositioneren tot verwijdering.
6. Na verwijdering, masker weggooien en handen wassen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Opslagtemperatuur: -20 °C en 40 °C.
Maximale vochtigheid bij opslag: 80%.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 19,5

Diepte (cm) : 10

Netto gewicht (kg) : 0,18

Bruto gewicht (kg) : 0,22



6 941094 039825

Omverpakking 1



x 60

Karton

Hoogte (cm) : 39

Lengte (cm) : 61,5

Diepte (cm) : 42

Netto gewicht (kg) : 12,2

Bruto gewicht (kg) : 13,2



3 701395 143415

Omverpakking 2



x 720

Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht (kg) : 160

Bruto gewicht (kg) : 177



3 701395 143422