

Maskers FFP2 (x 20)



Normen

EN149
(UE)2016/425

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Adembeschermingsmasker FFP2.

Technische details

Niet-geweven, voorgevormde gesmolten stof.
Neusstrip.
Twee elastieken voor ondersteuning.
Filtratie-efficiëntie > 94% van de aerosolen.
Totale binnenkomende lekkage < 8%.

Richtlijnen

Om de afdichting te controleren, plaatst u beide handen in een schelpvorm over het masker zonder het te bewegen en ademt u sterk uit. Als er lucht lekt, stel dan de band of de elastieken bij of verplaats het masker.

Het masker is voor eenmalig gebruik.

De duur van de bescherming kan tot acht uur achter elkaar zijn.

Toepassingen

Bescherming tegen indringing en projectie van vaste, vloeibare en fijnstofdeeltjes.

Gebruiksmethode

1. Trek het masker uit en breng het aan door het alleen bij de elastieken vast te houden.
2. Respecteer de toepassingsrichting met de strip aan de bovenkant van de neus.
3. Plaats de elastieken achter de oren.
4. Het masker moet goed uitgevouwen zijn. Bedek neus, mond en kin.
5. Eenmaal geplaatst, niet aanraken of herpositioneren tot verwijdering.
6. Na verwijdering, masker weggoien en handen wassen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 15,5
Lengte (cm) : 13,5
Diepte (cm) : 13,5
Netto gewicht (kg) : 0,2
Bruto gewicht (kg) : 0,21



Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 33
Lengte (cm) : 70
Diepte (cm) : 29
Netto gewicht (kg) : 4,2
Bruto gewicht (kg) : 5,5



x 20.00