

Masque chirurgical II R (x 50)



Caractéristiques

Code fournisseur article : 1220

Normes

EN14683

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Masque chirurgical anti-projections.

■ Détails techniques

Trois couches pliées, non tissées.

Anti-adhérent.

Barrette nasale.

Deux élastiques pour maintien derrière les oreilles.

Efficacité de filtration bactérienne > 98 %.

■ Conseils

Le masque est à usage unique.

Le masque doit être changé régulièrement.

■ Application(s)

Destiné à éviter lors de l'expiration, la projection d'agents infectieux par voie de gouttelettes ou par voie aérienne.

■ Mode d'utilisation

1. Extraire et appliquer le masque en le tenant uniquement par les élastiques.
2. Respecter le sens de pose avec la barrette en haut au niveau du nez.
3. Positionner les élastiques derrière les oreilles.
4. Le masque doit être bien déplié. Couvrir le nez, la bouche et le menton.
5. Une fois placé, ne plus toucher, ni le repositionner, jusqu'au retrait.
6. Après retrait, jeter le masque et se laver les mains.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 9
 Longueur (cm) : 19,5
 Profondeur (cm) : 10
 Poids net (kg) : 0,18
 Poids brut (kg) : 0,22

■ Surconditionnement 1



x 60

Carton

Hauteur (cm) : 39
 Longueur (cm) : 61,5
 Profondeur (cm) : 42
 Poids net (kg) : 12,2
 Poids brut (kg) : 13,2



3 701395 143309

■ Surconditionnement 2



x 720

Palette

Hauteur (cm) : 120
 Longueur (cm) : 80
 Profondeur (cm) : 120
 Poids net (kg) : 160
 Poids brut (kg) : 177



3 701395 143316