

CHIRURGISCH MONDMASKER CE BLAUW 50 STUKS



Normen

✓ EN14683

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Medisch mondkapje tegen spatten.

Technische details

Drie gevouwen, niet-geweven lagen.

Antiklevend.

Vorm voor de neus.

Twee elastieken voor achter de oren.

Bacteriële filtratie efficiëntie > 98 %.

Richtlijnen

Het mondkapje is voor eenmalig gebruik.

Het mondkapje moet regelmatig worden vervangen.

Toepassingen

Bedoeld om de verspreiding van infectieuze agentia door druppels of door de lucht te vermijden bij het uitademen.

Gebruiksmethode

1. Plaats en verwijder het mondkapje door het alleen bij de elastieken vast te houden.
2. Plaats het kapje met de strook aan de bovenkant van de neus.
3. Plaats de elastieken achter de oren.
4. Het masker moet goed uitgevouwen zijn. Bedek de neus, de mond en de kin.
5. Na het aanbrengen, mag u het kapje niet meer aanraken of herpositioneren totdat u het afdoet.
6. Na het afdoen moet u het kapje weggooien en uw handen wassen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 19,5

Diepte (cm) : 10

Netto gewicht : 0,18

Bruto gewicht (kg) : 0,22

Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht : 160

Bruto gewicht (kg) : 177



3 701395 143316

Oververpakking 1



x 60.00

Karton

Hoogte (cm) : 39

Lengte (cm) : 61,5

Diepte (cm) : 42

Netto gewicht : 12,2

Bruto gewicht (kg) : 13,2



3 701395 143309